

www.moti.dk
moti@moti.dk

BRUGERVEJLEDNING



MOTI



MOTI ApS

CVR. 40583629
Fredrik Bajers Vej 300
9220 Aalborg Øst
Danmark

Flere vejledninger
og sprog her:





ANVENDELSESFORMÅL

MOTI-målesættet er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale til måling af Joint Range of Motion (ROM) og Joint Repositioning (JRP) af nakke, skulder, albue, underarm, håndled, hofte, knæ og ankel som anvist i denne vejledning. **MOTI**-måleenheden er beregnet til at blive monteret med **MOTI**-remmen eller -klistermærke som anvist i denne vejledning.




INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDET AF SÆTTETS KASSE	2
SÅDAN STYRES DIN ENHED	2
HVAD BETYDER LYSINDIKATOREN	2
SÅDAN OPLADES OG VÆKKES DIN ENHED	2
SÅDAN SAMLES REMMEN	3
SÅDAN ANVENDES REMMEN	3
SÅDAN ANVENDES ENGANGSKLISTERMÆRKET	4
SÅDAN RENGØRES DIT SÆT	4
SÅDAN FORBINDES DU MED DIN ENHED	5
SÅDAN UDFØRER DU EN ROM-MÅLING	5
SÅDAN UDFØRER DU EN JRP-MÅLING	6


INDHOLDET AF SÆTTETS KASSE




Bekræft at de følgende dele er inkluderet i kassen:

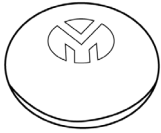


Enhed

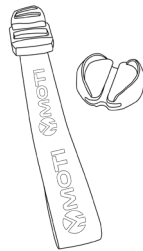

Rem + holder

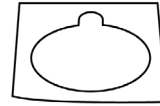

Engangsklistermærker
100 stk.

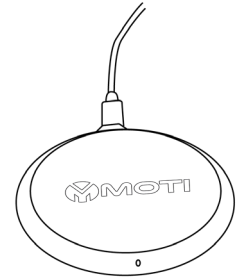

Trådløs oplader + kabel

Bemærk: Hvis en del er beskadiget, tag den ikke i brug og kontakt os på moti@moti.dk.


SÅDAN STYRES DIN ENHED



Download **MOTI**-appen på din smartphone eller tablet for at styre din **MOTI**-enhed.



(MOTI Move)

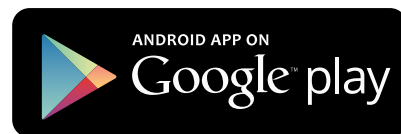

(MOTI)



HVAD BETYDER LYSINDIKATOREN



LYSINDIKATOR	ENHEDENS TILSTAND
Lyser blå	Forbundet og klar til brug
Blinker blå hurtigt 3 gange	Tændt efter vækning
Blinker orange	Lavt batteriniveau
Blinker hvid	Oplader
Blinker blå	Fuldt opladt
Blinker hvid hurtigt 3 gange	Går i dvale
Lyser orange	Opvågning fejlede



SÅDAN OPLADES OG VÆKKES DIN ENHED




Oplad din **MOTI**-enhed ved at forbinde din trådløse oplader til en strømforsyning med USB-kablet og placér **MOTI** på opladeren.
Oplad MOTI før brug.

MOTI går i dvale, når den ikke er forbundet efter 1 minut. Ryst din **MOTI**-enhed eller placér den på den trådløse oplader for at vække den fra dvale.


SÅDAN SAMLES REMMEN

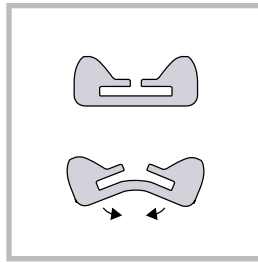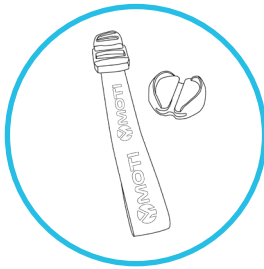

1 Bøj holderen en smule.

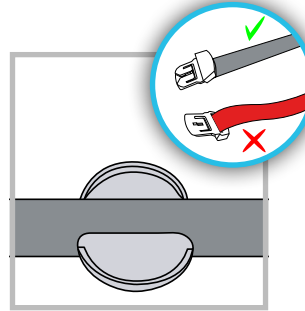

2 Placér remmen i den ene rille.

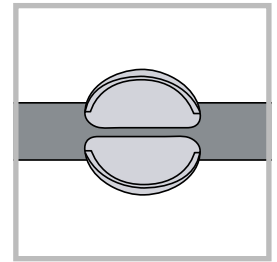


3 Stop den anden side ind i den anden rille.


SÅDAN ANVENDES REMMEN




Påsætning

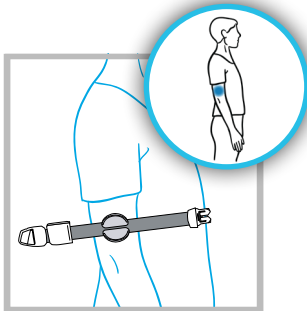


1 Placér remmen så holderen er placeret i det blå område som anvist i appen.

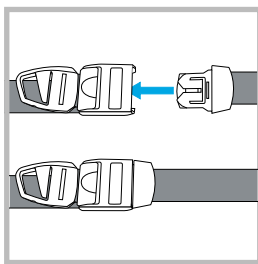

2 Lås remmen rundt om en kropsdelt ved at sætte spændet i spændeåbningen.

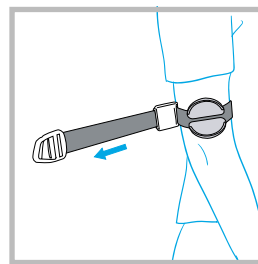


3 Stram remmen ved at trække i den løse ende, så den ikke flytter sig under måling.

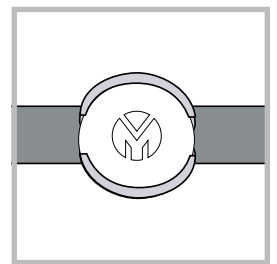


4 Indsæt **MOTI** med synligt logo i holderen, når remmen er sikker.

Aftagning

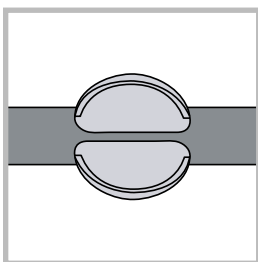

1 Fjern **MOTI** fra holderen før spændet låses op.

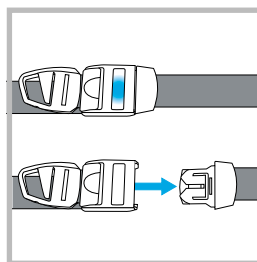


2 Tryk på knappen på spændet for at låse den op og fjern remmen.




SÅDAN ANVENDES ENGANGSKLISTERMÆRKET


Påsætning

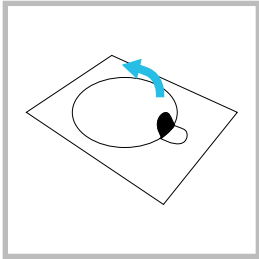


- 1 Fjern den firkantede film ved at trække i både den hvide og sorte snip.

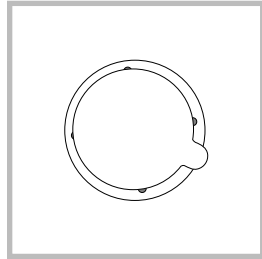

- 2 Placér klistermærket på bagsiden af **MOTI**.

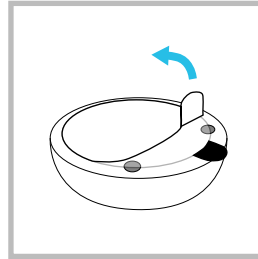


- 3 Fjern den anden film fra klistermærket ved at trække i den hvide snip.

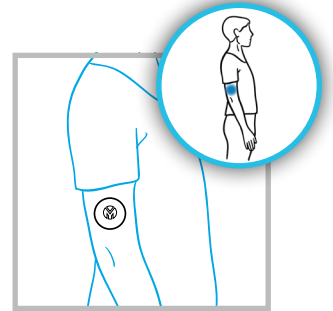


- 4 Placér **MOTI** i det blå område på huden som anvist i appen.

Aftagning

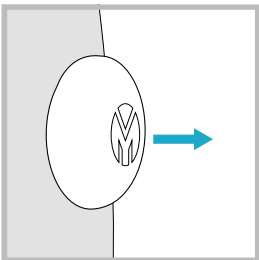

- 1 Træk langsomt **MOTI** af huden.

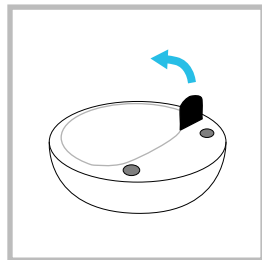

- 2 Fjern klistermærket og smid det i skraldespanden.




SÅDAN RENGØRES DIT SÆT


Rengør **MOTI** måleenheden og remmen med en klud og desinficeringsvæske.

MOTI engangsklistermærker skal smides ud efter brug.


SÅDAN FORBINDES DU MED DIN ENHED

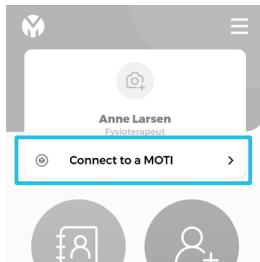


1 Klik/hold **Connect to a MOTI**.

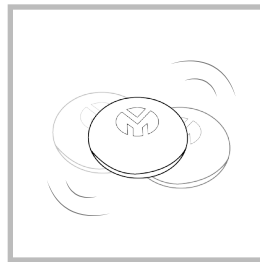

2 Ryst din **MOTI**-enhed.

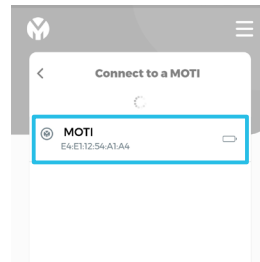

3 Klik på en **MOTI** for at forbinde til den.

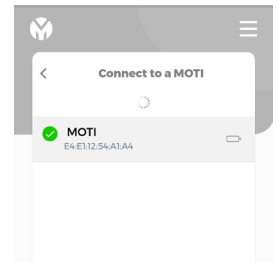


4 Du er nu forbundet.


SÅDAN UDFØRER DU EN ROM-MÅLING




1 I din klients oversigt, klik **+**.

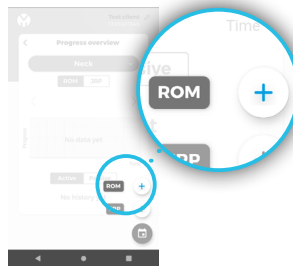


2 Klik **ROM** for ny ROM-måling.

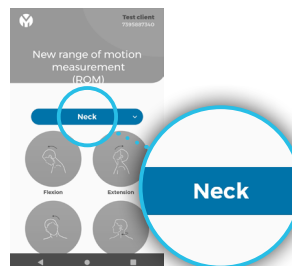


3 Klik på led-menuen for at skifte led.

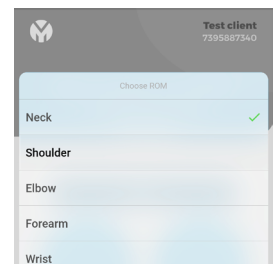


4 Vælg det led, du vil måle.

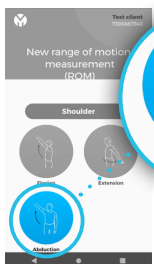


5 Vælg den bevægelse, du vil måle.

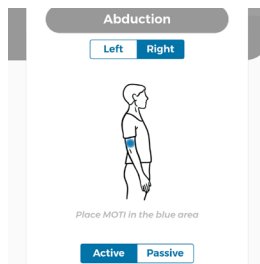


6 Vælg side, og om bevægelsen er aktiv eller passiv.

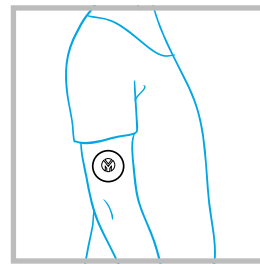


7 Placer **MOTI** i det blå område med rem eller klistermærke.

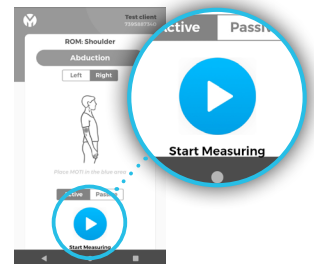


8 Når din klient er i neutral position, klik start.

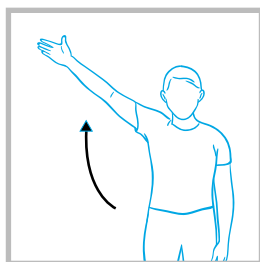


9 Din klient udfører bevægelsen.

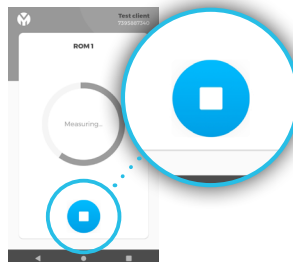

10 Klik **■** for at stoppe målingen.

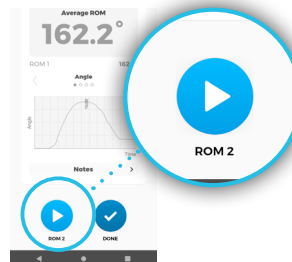


11 Klik **▶** for at måle igen og lave et gennemsnit og/eller

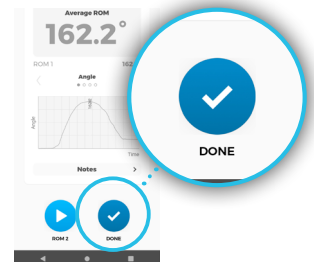


12 klik **✓** når du er færdig. Resultatet er tilføjet til oversigten.


SÅDAN UDFØRER DU EN JRP-MÅLING

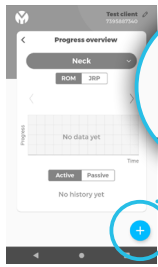


1 I din klients oversigt, klik +.

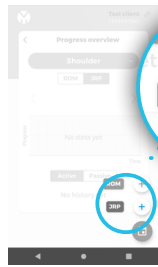

2 Klik **JRP** for ny JRP-måling.

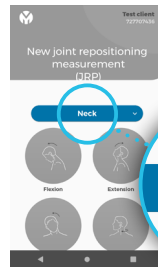

3. Klik på led-menuen for at vælge led.

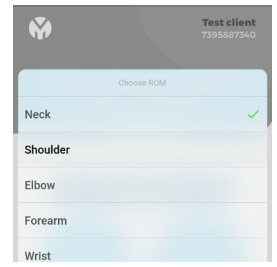


4 Vælg det led, du vil måle.



5 Vælg den bevægelse, du vil måle.




6 Vælg side.

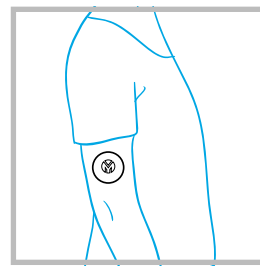


7 Placer **MOTI** i det blå område med rem eller klistermærke.




8 Din klient lukker sine øjne.

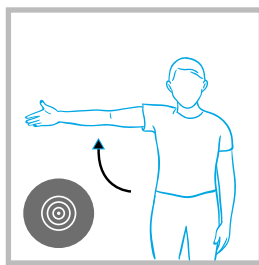


9 Flyt din klients led i målposition.

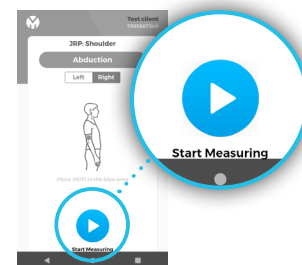


10 Klik start imens klienten er i målposition.

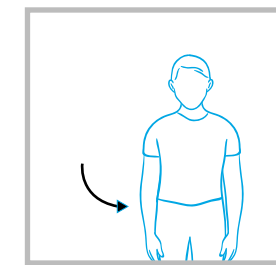


11 Din klient bevæger sig til neutral position.

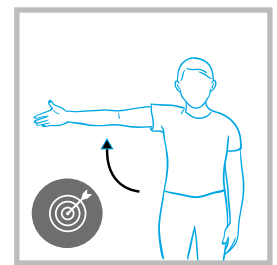

12 Din klient prøver så at ramme målpositionen.

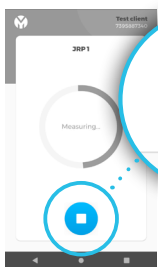

13 Klik ■ for at stoppe målingen, når klienten siger, at de er i målposition.

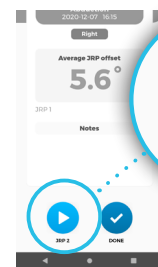

14 Klik ► når du er færdig. Resultatet er tilføjet til oversigten.



15 klik ✓ når du er færdig. Resultatet er tilføjet til oversigten.